


Easyviz paigaldusjuhend


Easyviz programmi kasutatakse Ida-Tallinna Keskhaiglas teostatud uuringute piltide vaatamiseks.

Kui Teil ei ole eelnevalt Easyviz programmi arvutisse paigaldatud, siis on seda võimalik teha järgneva juhendi järgi.


1. Sisesta veebibräuseris aadressiribale aadress <https://easyviz.itk.ee/>
Avaneb allolev aken, vajuta „Download“



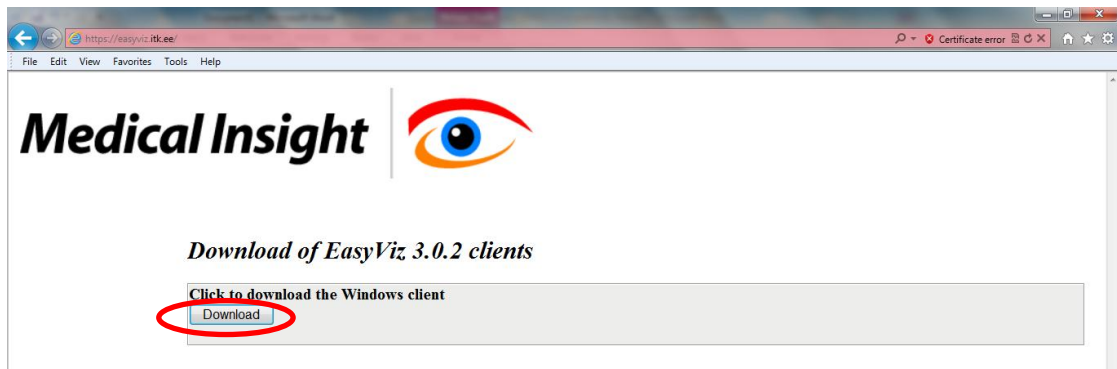



2. Lehe allosas tuleb hüpikaken, kus tuleb vajutada nupule „Run“

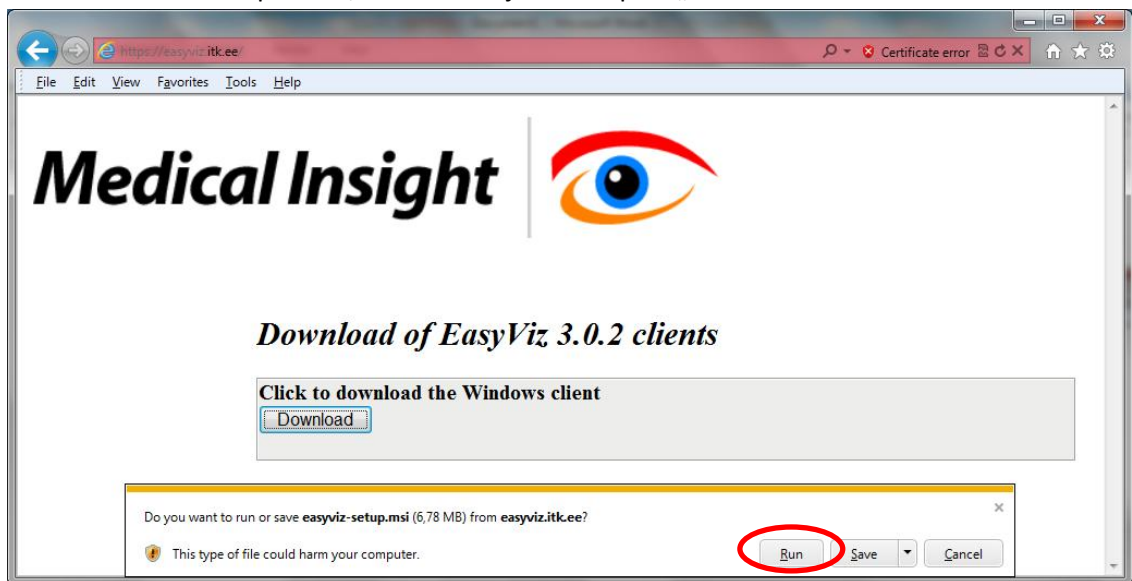


3. Järgnevatel eettulevatel akendes vajuta „Next“ ja ära täida ühtegi välja.

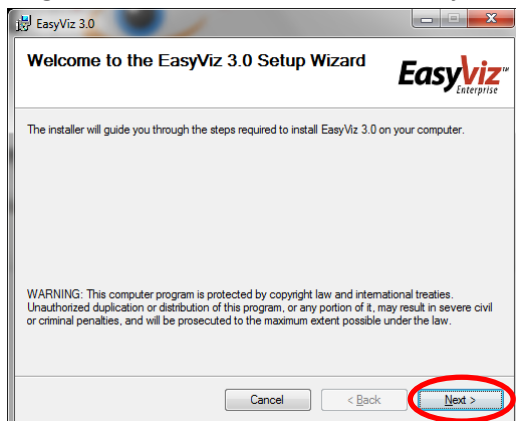

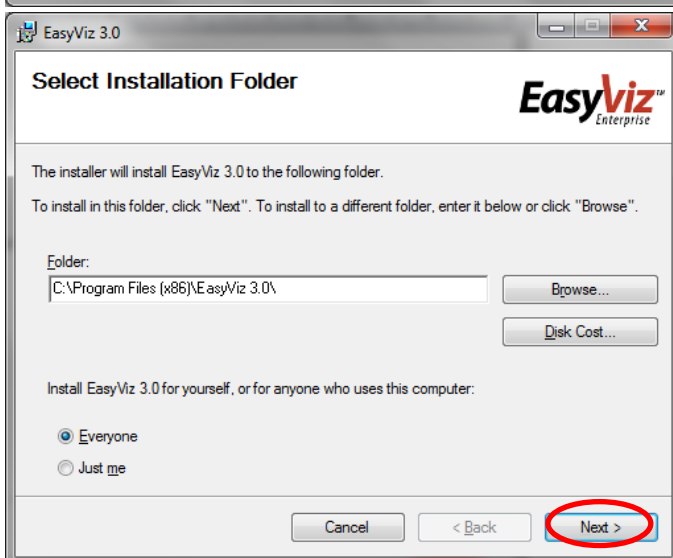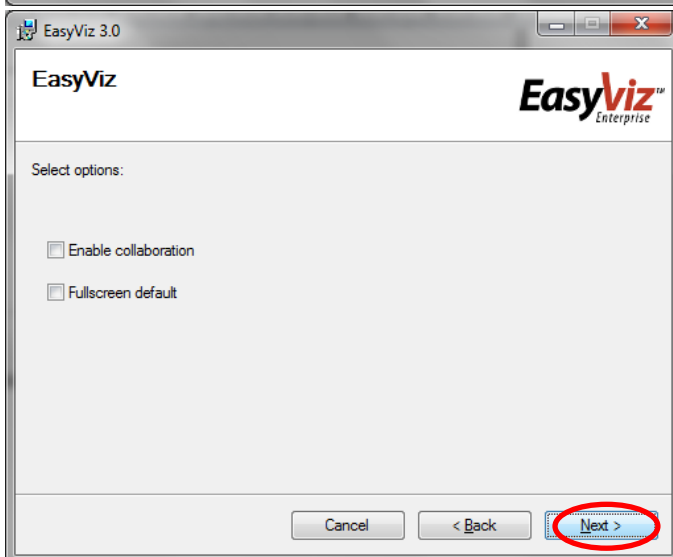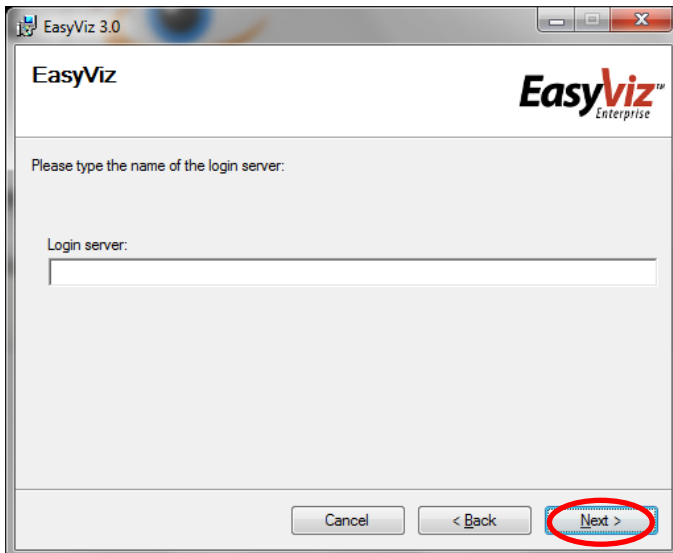


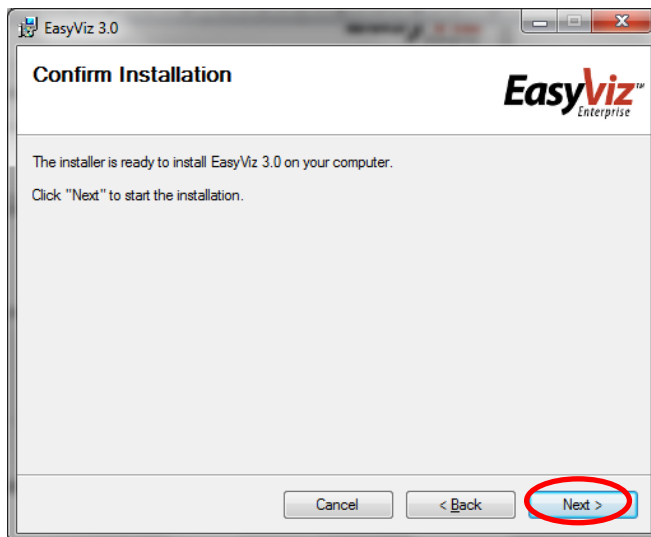

4. Toimub programmi installeerimine, midagi vajutada pole tarvis.

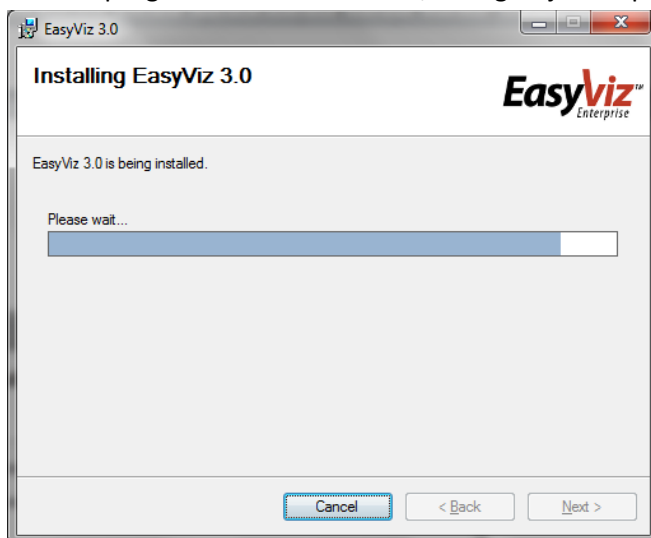

5. Programm on edukalt installeeritud. Vajuta „Close“.

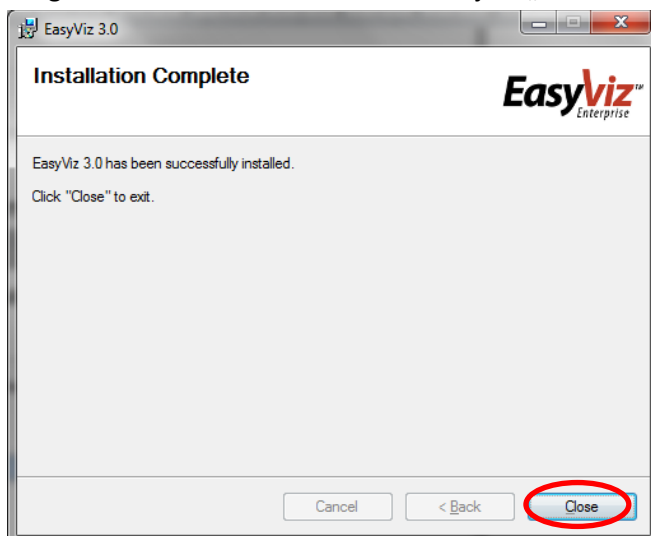

6. Küsimuste korral helista ITK Meditsiinitehnika teenistuse telefonil 6207931.