



Piltide vaatamine EasyViz programmiga

Uuringu piltide vaatamiseks tuleb vajutada nupule mis asub „Piltide vaatamine ITK PAKSist (EasyViz)” taga, see on antud uuringu number ja sellele vajutades avaneb konkreetne uuring. Kui aga vajutada „Kõik” nuppu avaneb kõigi uuringute nimekiri mis konkreetsele patsiendile on tehtud:

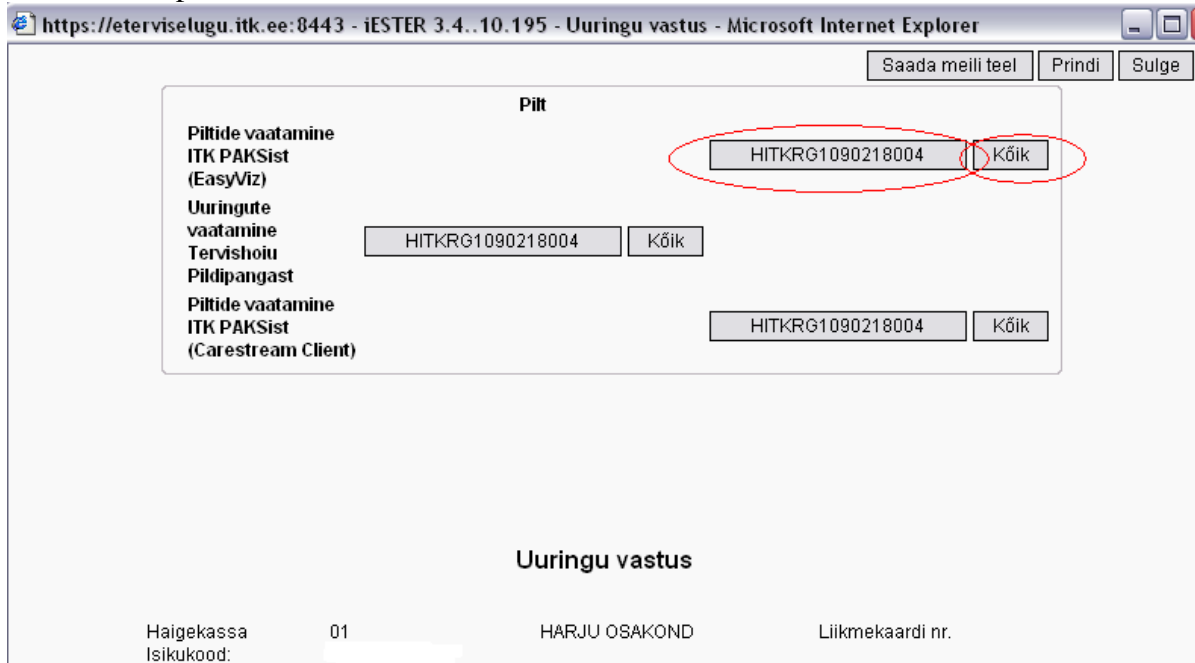


Piltide nimekiri avaneb EasyViz programmis:

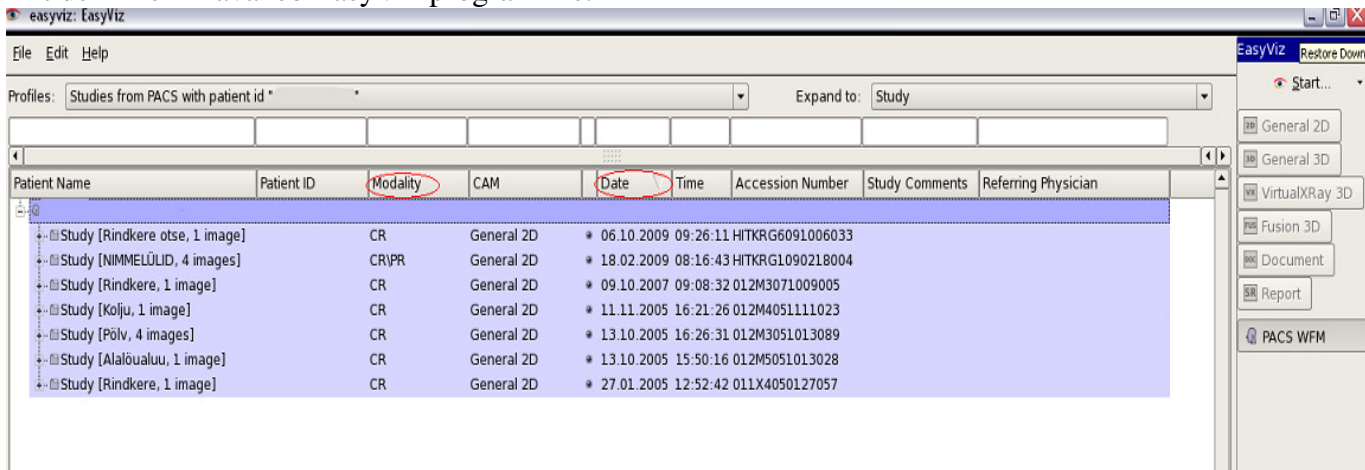


Vajutades siin *Modality* või *Date* lahtrisse võib sorteerida uuringud tüüpide või kuupäevajärgi.

Nimekirjas saab topelt klõpsuga avada terve grupi pildid (+-pluss) või avada samast +- grupp ja sealt topelt klõpsuga avada pilt. Kui on vaja avada mitu gruppi / alamgruppi korraga, siis tuleb klaviatuuril hoida *Ctrl* nuppu ja hiire vasaku nupuga vajutada (muutuvad tumesinisteks) gruppidele/ alamgruppidele. Kui valik on tehtud, siis tuleb vajutada *Enter* klahv klaviatuuril või vajutada nupu „Show“ (asub all vasakus nurgas):

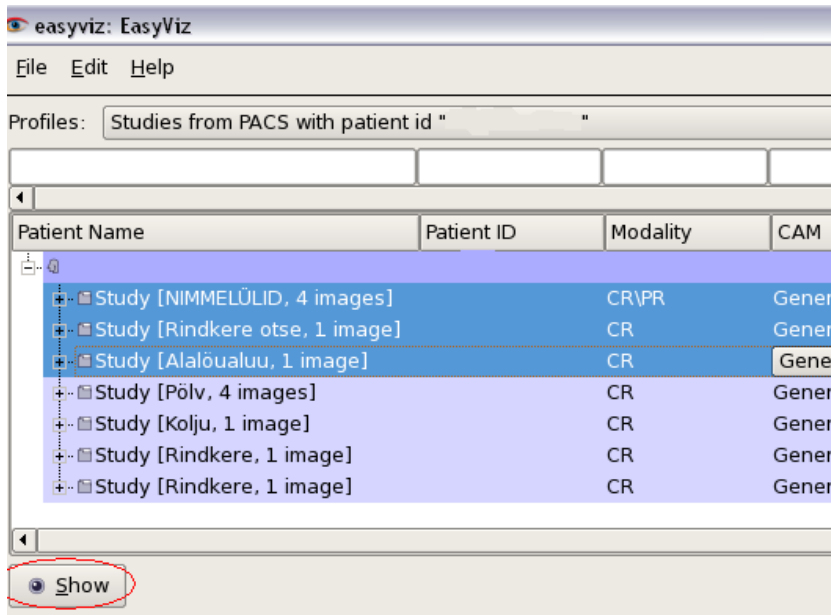


Lahti tulevad valitud pildid:

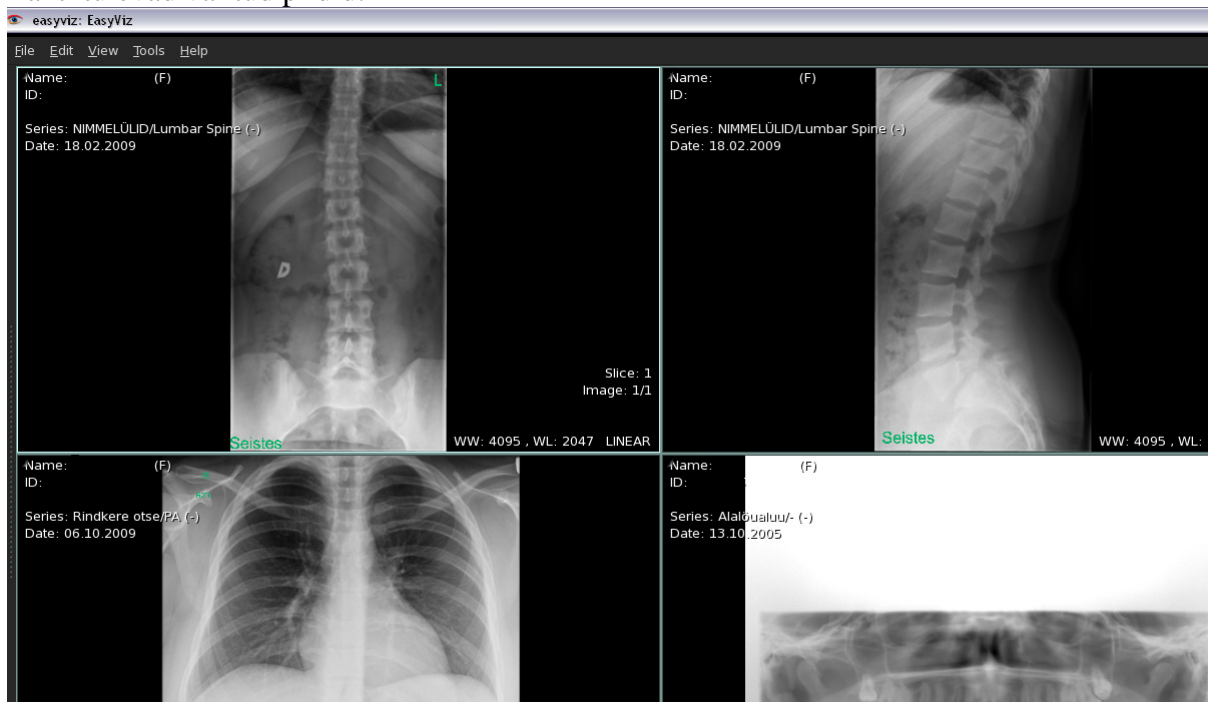

EasyViz nupud:

Konkreetses pildivaatamise aknas kinni panemiseks ja nimekirja tagasi tulemiseks tuleb kasutada nuppu „PACS WFM“ või punast ristile:

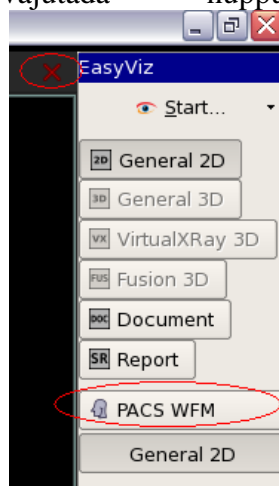

Selleks, et pildivaatamise akna üldse kinni panna ja minna E-terviselukku tagasi - tuleb vajutada üleval paremas nurgas asuvale ristile või Start > Logout :

