

ECSTASY URIINIS

Lühend	U-Ecs
Mõiste	MDMA (metüleendioksümetamfetamiin) ehk ecstasy on sünteetiline amfetamiini derivaat, stimulandi ja nõrga psühheedelikumi omadustega psühhoaktiivne aine. Sümpatomimeetiline toime põhjustab endogeensete katehoolamiinide, eriti noradrenaliini ja dopamiini vabanemist ning blokeerib nende tagasihaaret presünaptilistesse vesiiklitesse. Suurendab ärrituvust, vähendab väsimust, põhjustab eufooriat, vererõhu tõusu, pulsi kiirenemist, hüpertermiat, raskematel juhtudel infarkti, südame rütmihäireid, aordi dissektsiooni, ajuhemorraagiat.
Näidustused	MDMA tarvitamise tuvastamine
Proovivõtu vahendid	Uriini proovitops või uriinikatsuti
Materjali säilivus ja transport	2–8 °C 48 h, –20 °C pikemaajaliselt
Teostamise aeg ja koht	Ööpäev läbi, kliinilise keemia labor, Ravi 18
Mõõtmismeetod	Immuunkromatograafia (kiiruuring)
Referentsvahemikud	Negatiivne
Tõlgendus	Positiivne - MDMA sisaldus uriinis ületab testi tundlikkuse piiri NB! Juriidilistel näidustustel tehtud analüüsi positiivne tulemus vajab kinnitamist GC-MS või LC-MS meetodil Negatiivne - Uriinis ei leidu MDMA-d - MDMA sisaldus uriinis ei ületa testi tundlikkuse piiri
Hinnakirja koodid	66141
Kirjandus	- Kiirtesti kasutusjuhend: nal von minden Drug-Screen® Single/Multi Test (Urine) Rev.1.00 2023-12-12 - UpToDate MDMA (ecstasy) intoxication 2025-02 https://www.narko.ee/ained/mdma-ehk-ecstasy/
Koostaja	Piret Kedars